



補聴器

総合カタログ

大切な人 大切な言葉
伝えたい

コミュニケーションを応援する
ニコン補聴器




日々の生活の中で、聞きたい音がある。

大切な人との何気ない会話
大切な時間・・・

毎日をより一層幸せに過ごすために
そんなお客様の生活を、高品質、
高度な技術でサポートいたします。

補聴器を選ぶ前に

聞こえと難聴について

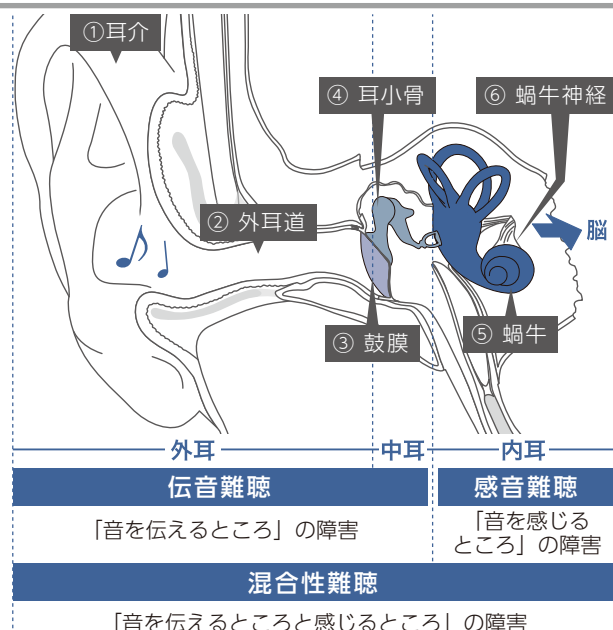

音が聞こえるしくみ

人の耳は外耳から外耳、中耳、内耳の3つに分けられます。外耳は主に音を集めて鼓膜に伝える働きをし、中耳は鼓膜の振動を内耳に効率よく伝えます。そして内耳はその振動を電気的な信号に変えて脳に伝える働きをしています。

難聴の種類

伝音難聴

中耳炎等で鼓膜に穴があいたり、耳小骨の動きが悪くなるなど外耳および中耳の部分に生じた障害のために起こる難聴です。

感音難聴

内耳、蝸牛神経、脳に生じた障害のために起こる難聴です。加齢による難聴も感音難聴の一種です。

混合性難聴

伝音難聴と感音難聴の両方の障害をもつ難聴です。

「聞こえ」の簡単チェック


当てはまる項目をチェックしてみましょう。

チェックが1つでもあれば、補聴器が有効かもしれません。まずは、耳鼻咽喉科へのご相談をおすすめします。

- ☐ …最近、テレビの音が大きいと言われる。
- ☐ …会議で相手の発言が聞きとりにくい。
- ☐ …聞き間違えることが多い。
- ☐ …会話が聞きとれず、二度聞きしてしまう。
- ☐ …病院などで呼ばれても気づかないことがある。
- ☐ …後ろから呼ばれても気づかない。

聞こえの程度と年齢別による聴力低下

長い年月を経ると、聴力は徐々に変化していきます。あなたの聞こえに合った補聴器を選びましょう。

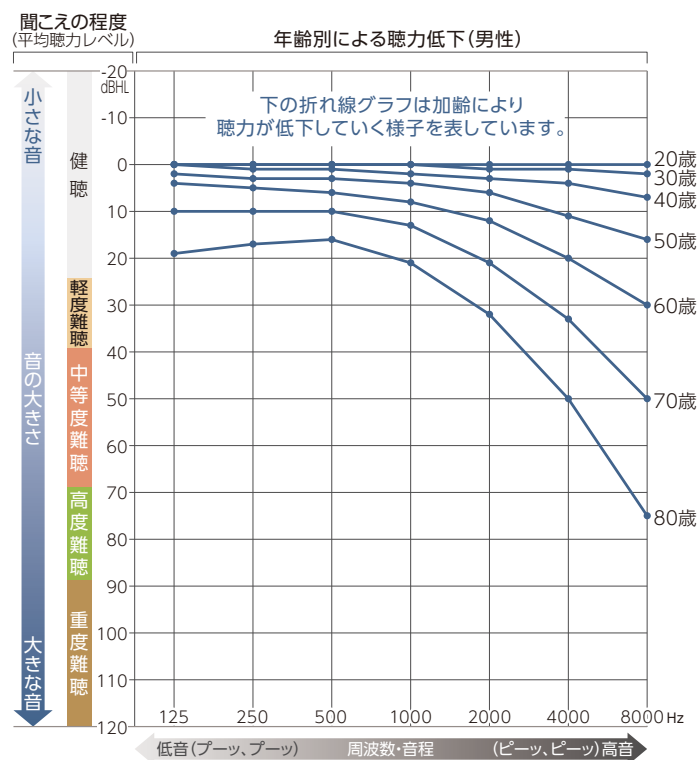

《折れ線グラフの参考文献》
ISO 7029:2017 Acoustics — Statistical distribution of hearing thresholds as a function of age and gender

平均聴力レベル (dBHL)

25	30	40	50	60	70	80	90	100
軽度		中等度		高度		重度		
軽度難聴		中等度難聴		高度難聴		重度難聴		
25dBHL以上 40dBHL未満		40dBHL以上 70dBHL未満		70dBHL以上 90dBHL未満		90dBHL以上		
小さな声の会話を聞きとれなかったり、聞き間違えたりする。		普通の大きさの声の会話を聞きとれなかったり、聞き間違えたりする。		大きな声の会話でも聞きとりにくい。		かなり大きな声でも聞きとりにくい。		

コメント

販売店からのご提案

あなたに
おすすめの
補聴器は？

本カタログ
P. _____

本カタログ
P. _____


初めての補聴器を 快適にお使いいただくために

補聴器をお使いいただく上で、
一番大切なことは・・・

新しい聞こえに早く慣れるためには・・・

ステップ 1

正しい装用の仕方、スイッチやボリューム
操作、電池交換に慣れましょう

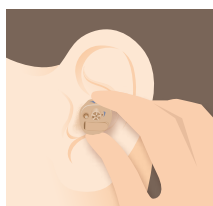

ステップ 2

最初は静かな場所で30分～1時間
疲れない程度で毎日使い続け、ご家族と
1対1の対面で会話しましょう



ステップ 3

テレビのニュースや天気予報を
周りの方と同じ音量で聞いてみましょう



ステップ 4

ご家族やご友人など複数人との会話、
会議、講演会での聞きとりにも挑戦し
少しずつ聞く範囲を広げましょう



ご家族の皆様へお願い

補聴器を装用されている時は、大声で話さずに正面より
顔を見つめてゆっくりはっきりとお話してください。

両耳装用をおすすめ

補聴器は片方の耳だけではなく両方の耳に装用することで
聞こえの能力を最大限に引き出し、より自然に聞こえが得ら
れます。両耳装用の効果をお試ください。



雑音が多い場面でも聞きとりやすい

必要な言葉と雑音の区別がラクになり、騒音下での
聞きとりが向上します



音の方向感、距離感がつかみやすい

後ろから近づいてくる車や自転車の音の方向が分かり
やすくなります



耳への負担を軽減

耳に優しい小さめの音で言葉が聞きとれるように
なります




聞きやすい範囲が広がります

音の広がりや奥行きが増し、立体感のある聞こえで
楽しめます

両耳で補聴器を装用することの大切さ 両耳の働き

方向感

距離感

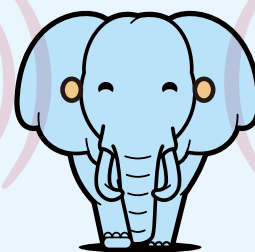

ふたつの耳でバランスよく聞くことで
音を上手に聞きとっています。

(((両耳に補聴器を使用することで
しっかり聞きとれます。)))

高機能オーダーメイド マイコントロールデジタル 補聴器

会話の聞きやすさが、
ここまで進化したワイヤレスシステム



テレビの音を補聴器で聞く
アダプターをテレビに接続し
補聴器へ直接音声を届けます



**携帯電話や
スマートフォンで会話する**
Bluetooth(ブルートゥース)*対応の
電話機であれば補聴器を通し会話
が届きます



**音楽プレーヤーを
補聴器で聞く**
外部機器と接続して補聴器から
音楽を楽しむことができます



双方向通信
左右どちらか一方の補聴器を操
作すれば、もう一方の補聴器も
自動的に連動します

(別売品マルチリモコンが必要となります)

こんな音に 不快なピーピー音

不快なピーピー音を抑える
「ハウリングキャンセラー (AFBC)」

不快なピーピー音を抑制する機能

こんな音に エアコンや交通騒音など

騒がしい場所でも快適に聞こえるようにする
「騒音抑制 (NR)」

エアコンのついた部屋にいるときや、車や電車に乗ったときなど、気にな
る騒音を抑え、快適に聞こえるようにします。風雑音低減機能搭載

こんな音に 食器がぶつかる音など

予期せず起きる突発的な音を瞬時に抑える
「衝撃音低減 (PNS)」

食器を洗うときに出る「カチャカチャ」という音やドアが「ボタン」
と閉まる音など不快な衝撃音を抑えます。

* Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

ハイレベル技術で 最高度の快適さを追求

【あんしん機能】 ○らくらく電池交換方式 ○3年保証 ○耐汗コート

ND-CX3 (CIC)

平均聴力 80dB まで対応

16 バンド 4 チャンネル



小型で耳にしっかり入って
目立ちにくい

軽 中 高 3年保証

希望小売価格

両耳 715,000 円 (非課税)
片耳 380,000 円 (非課税)

ND-CX4 (ITC)

平均聴力 90dB まで対応

16 バンド 4 チャンネル



幅広い聴力に対応
持ちやすく挿入しやすい

軽 中 高 3年保証

希望小売価格

両耳 685,000 円 (非課税)
片耳 365,000 円 (非課税)

ND-CXD (ITC)

平均聴力 90dB まで対応

16 バンド 4 チャンネル



「指向性機能」搭載
正面の会話がより際立ちます
音量調整はレバー式

軽 中 高 3年保証

希望小売価格

両耳 725,000 円 (非課税)
片耳 385,000 円 (非課税)



多彩な機能を盛り込んだマルチリモコン


NR-P1 2年保証

別売 希望小売価格 50,000 円 (税抜)

テレビアダプター、各種接続コード類、充電器など付属
電源：内蔵充電電池

フルデジタル オーダーメイド補聴器

音声の特徴をきわだたせる「音声強調 (SSS)」

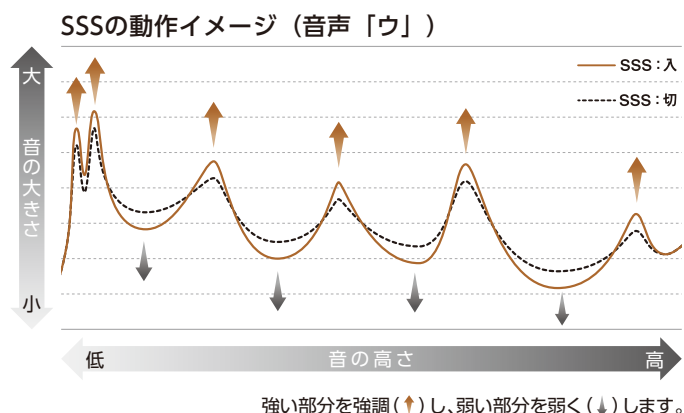

音声のもつ特徴をきわだたせることで
言葉をより聞きとりやすくします。



※イラストはイメージです。

こんな音に 不快なピーピー音

不快なピーピー音を抑える

「ハウリングキャンセラー (AFBCα)」

不快なピーピー音を抑制する機能が更にアップ

こんな音に エアコンや交通騒音など

騒がしい場所でも快適に聞こえるようにする

「騒音抑制 (NR)」

エアコンのついた部屋にいるときや、車や電車に乗ったときなど、気になる騒音を抑え、快適に聞こえるようにします。

こんな音に 食器がぶつかる音など

予期せず起きる突発的な音を瞬時に抑える

「衝撃音低減 (PNS)」

食器を洗うときに出る「カチャカチャ」という音やドアが「バタン」と閉まる音など不快な衝撃音を抑えます。

最上級の自然な聞こえ

より聞きやすく、より使いやすくを追及し
多彩な高機能を搭載。

小型でもパワーを兼ね備え
快適性を重視した補聴器です。

【あんしん機能】 ○らくらく電池交換方式 ○2年保証 ○耐汗コート

ND-C7NR(CIC)

平均聴力 80dB まで対応

10バンド4チャンネル



小型で耳にしっかり入って
目立ちにくい

軽 中 高 2年保証

希望小売価格

両耳 405,000 円 (非課税)

片耳 218,000 円 (非課税)

ND-C8NR(ITC)

平均聴力 90dB まで対応

10バンド4チャンネル



幅広い聴力に対応
持ちやすく挿入もしやすい

軽 中 高 2年保証

希望小売価格

両耳 405,000 円 (非課税)

片耳 218,000 円 (非課税)

デジタルオーダーメイド補聴器

高度難聴ハイパワータイプ（フルデジタル）

【あんしん機能】 ○らくらく電池交換方式

○2年保証

○耐汗コート

【充実機能搭載】 ○ハウリング抑制（AFBC搭載）

○雑音抑制（NR搭載）

○衝撃音低減（PNS搭載）

ND-C8P

平均聴力 110dB まで対応

6 バンド 4 チャンネル



パワフルな音量感と
余裕のある聞こえを実現

中 高 重 2年保証

希望小売価格

両耳 335,000 円 (非課税)

片耳 180,000 円 (非課税)

お求め易い低価格タイプ（トリマーデジタル）

【あんしん機能】 ○らくらく電池交換方式

○1年保証

○耐汗コート

【充実機能搭載】 ○ハウリング抑制（AFBC搭載）

○雑音抑制（NR搭載）

ND-CF

平均聴力 70dB まで対応



お求め易い価格が魅力
両耳装用もおすすめていたします

軽 中 1年保証

希望小売価格

両耳 180,000 円 (非課税)

片耳 98,000 円 (非課税)

ニコン補聴器保証制度

1年間の無料修理

お買い上げの日より保証期間中に自然故障が生じた場合は、無料で修理いたします。

(ND-CF、NEF-02、NEF-07、ND-F2、NEF-P1、NDP-11H、ND-B1LT、ND-BRT、ND-B7T)

※NEF-P1、NDP-11Hのイヤホンコードは保証対象外となります。

2年間の無料修理

お買い上げの日より保証期間中に自然故障が生じた場合は、無料で修理いたします。

(ND-C7NR、ND-C8NR、ND-C8P、ND-BR1、ND-B4)

3年間の無料修理

お買い上げの日より保証期間中に自然故障が生じた場合は、無料で修理いたします。

(ND-CX3、ND-CX4、ND-CXD)

120日以内の無償調整（オーダーメイド）

お買い上げの日より保証期間中に、オーダーメイド補聴器の形や聞こえ具合が合わない場合は無償で調整いたします。

火災、盗難などにあったときの事故保険

補聴器がお買い上げの日より1年6ヶ月以内に盗難、火災にあった場合、1回に限り無償修理もしくは現品再交付の保証をいたします。(NEF-02、NEF-P1は対象外となります)ただし、天災および自己の不注意(置き忘れ、紛失、故意)による損害を除きます。

イヤファッションシリーズ

初めての方でも安心してかんたんに使用できる耳あな型
両耳装用おすすめタイプ

両耳装用おすすめ補聴器

補聴器が初めての方も安心の両耳装用推奨タイプです

小型で目立たず、メガネの邪魔になりません

NEF-07

プッシュ式 平均聴力 60dB まで対応



- プッシュボタンで4種類の音質変更
ご自身のお気に入りの聞こえモードが見つかります
- ハウリングキャンセラー機能搭載
ピーピー音漏れ音を抑制いたします
- かんたんボリューム調整機能付
指先で簡単に音量調整ができます
- らくらく電池交換方式採用
電池を裏表どちらに入れても動作します
- ノイズキャンセラー機能搭載
ざわざわとした一定雑音を抑制します

軽 中

1年保証

最良の聞こえ！両耳装用でもお求めやすい価格を実現しました

両耳推奨価格 ￥75,000 (非課税) 片耳価格 ￥45,000 (非課税)



「安心の4段階ステップアップ機能搭載」

プッシュボタンで簡単に4種類の聞こえモードに変更ができます
モード変更ボタン ご自身の聴力に合ったお気に入りの聞こえモードが見つかります

【各モードの説明】



パワー十分のハイクラスタイプ

ND-F2

トリマー式 平均聴力 70dB まで対応



- ピーピー音のカット
- ノイズ雑音軽減機能
- 電池表裏関係なく動作
- ボリューム調整機能付

- 出力制限機能
必要以上に大きな音が出ないように抑制し、
会話音声を聞きとりやすくします
- 音質調整器
ご自身の声がこもって聞こえたり、
周囲の雑音を優しい音質に調整します

軽 中

1年保証

希望小売価格
片耳 ￥70,000 (非課税)

使い方も簡単なスタンダードタイプ

NEF-02

平均聴力 50dB まで対応



- お求めやすい価格帯で簡単装用
- 音量調整ボリューム付

軽 中

1年保証

希望小売価格
片耳 オープン価格 (非課税)

耳かけ型 RIC タイプ

小型で目立ちにくく快適なかけ心地

ND-BR1

フルデジタル 平均聴力 70dB まで対応

6 バンド 4 チャンネル



小型でオシャレな形状、
目立ちにくい
「音声強調 (SSS)」
「指向性機能」により
正面の会話がより際立ちます

軽 中 2年保証

希望小売価格
片耳 148,000 円 (非課税)

ND-BRT

トリマー式 平均聴力 65dB まで対応



○小型で目立ちにくく、
軽やかなつけ心地
○お手頃価格でおしゃれ
なデザイン

○ピーピー音のカット
○ノイズ雑音軽減機能
○電池表裏関係なく動作

軽 中 1年保証

希望小売価格
片耳 59,000 円 (非課税)

耳かけ型 標準タイプ

ND-B4

フルデジタル 平均聴力 90dB まで対応

6 バンド 2 チャンネル



幅広い聴力に適應した高性能
補聴器です
お客様の聞こえに合わせて
きめ細かく調整

○ピーピー音のカット
○ノイズ雑音軽減機能
○電池表裏関係なく動作
○ボリューム調整機能付

軽 中 高 2年保証

希望小売価格
片耳 98,000 円 (非課税)
誘導コイル機能付

ND-B1LT

トリマー式 平均聴力 70dB まで対応



○出力制限機能
必要以上に大きな音が出な
いように抑制し、会話音声
を聞きとりやすくします
○音質調整器
ご自身の声がこもって聞こ
えたり、周囲の雑音を優し
い音質に調整します

○ピーピー音のカット
○ノイズ雑音軽減機能
○電池表裏関係なく動作
○ダイヤル式ボリューム付

軽 中 1年保証

希望小売価格
片耳 58,000 円 (非課税)

高度難聴対応タイプ

ND-B7T

トリマー式 平均聴力 90dB まで対応



○出力制限装置機能
必要以上に大きな音が出な
いように抑制し、会話音声
を聞きとりやすくします
○音質調整器
ご自身の声がこもって聞こ
えたり、周囲の雑音を優し
い音質に調整します

○ピーピー音のカット
○ノイズ雑音軽減機能
○電池表裏関係なく動作
○ダイヤル式ボリューム付

軽 中 高 1年保証

希望小売価格
片耳 88,000 円 (非課税)

ポケット型補聴器

初めての方でも
かんたんに使用できるポケット型

NEF-P1

トリマー式 平均聴力 50dB まで対応



○両耳イヤホンタイプ
両耳で聞くことで会話がはっきり聞きとれます

○音量も N (パワー) と H (リラックス) モードに簡単に切り替え可能
○耳元にマイクがあるため衣擦れの雑音がありません

軽

1年保証

希望小売価格
オープン価格 (非課税)

NDP-11H

トリマー式 平均聴力 70dB まで対応



○片耳イヤホンタイプ
音量感があるパワータイプです

○音量も N (パワー) と H (リラックス) モードに簡単に切り替え可能
○耳元にマイクがあるため衣擦れの雑音がありません

軽 中

1年保証

希望小売価格
¥39,800 (非課税)

ご注意 ポケット型補聴器のイヤホンコードは保証対象外となります

おしゃれなクリップ型集音器

超小型本体約 4 グラムで
聞きたい会話をクリアな音質でキャッチ

クリップ・ミニ

- クリップ式でおしゃれにかんたん装着
- 左右兼用のためどちらの耳にも使用可能
- ボリュームとオン/オフのスイッチ付でかんたん使用
- 安心の日本製



衣服にかんたん装着



耳元マイクタイプで
ハウリングや、
衣服の擦れ音も軽減

マイク

希望小売価格 ¥25,000 (税抜)

初めての方でも安心して使用できるように考えました



電源スイッチ

ボリューム調整

電源スイッチを入れ、ボリューム調整 (4 段階) を行うだけ

※オプションでパワー
カナルイヤホンも
ございます。



希望小売価格
¥5,000 (税抜)

ご注意 イヤホンコードは保証対象外となります

アクセサリ

耳あなタイプ



耳あな ミミセン
S M L LL

希望小売価格 2個入 ¥800(税抜)



電池ボックス (NEF-02 用)
右、左

希望小売価格 オープン



電池ボックス (NEF-07、ND-F2 共通)
右、左

希望小売価格 オープン



音響ダンパー
(NEF-02、NEF-07、ND-F2 共通)

希望小売価格 10個入 ¥1,200(税抜)

オーダーメイドタイプ



耳垢防止チップ
タイプ大 (9 穴)
フルサイズ用

希望小売価格
10個入 ¥420(税抜)



耳垢防止チップ
タイプ小 (7 穴)
CIC、カナル用

希望小売価格
10個入 ¥1,000(税抜)

耳垢防止チップ SS キット

希望小売価格 ¥1,000(税抜)



耳垢防止チップ G

希望小売価格
20個入 ¥400(税抜)



耳垢防止チップ G
キット

希望小売価格 ¥1,000(税抜)

耳かけタイプ



ソフトミミセン
SS S MS M

希望小売価格
5個入 ¥1,050(税抜)



ミミセン
S MS M ML L LL

希望小売価格
5個入 ¥1,050(税抜)



チューブ付きジョイント

希望小売価格 10個入 ¥1,100(税抜)



防滴チューブ付きジョイント

希望小売価格 10個入 ¥2,600(税抜)



フック
(ND-B4 ND-B1LT ND-B7 共通)
S M L

希望小売価格 5個入 ¥1,575(税抜)



S チューブ
右用 左用
S M L

希望小売価格
¥900(税抜)



S チューブ用
オープン耳せん
右用 左用
S MS M

希望小売価格 2個入 ¥630(税抜)



S チューブ用
クローズ耳せん
右用 左用
S MS M

希望小売価格 2個入 ¥630(税抜)

ポケットタイプ



NEF-P1 用
イヤホンコード
希望小売価格
¥6,000(税抜)



NEF-P1 用
耳せん S M L
希望小売価格 2個入
¥800(税抜)



NDP-11H 用
イヤホンコード
希望小売価格
¥2,800(税抜)



NDP-11H 用
イヤホン
希望小売価格
¥3,000(税抜)

RICタイプ



EXスモールイヤホン
(ND-BRT ND-BR1 共通)
右用 左用
2(S) 3(M) 4(L)

希望小売価格 ¥10,000(税抜)



ミディアムイヤホン
(ND-BR1 用)
右用 左用
2(S) 3(M) 4(L)

希望小売価格 ¥10,000(税抜)



オープン耳せん
(ND-BRT ND-BR1 共通)
S MS M

希望小売価格 2個入 ¥630(税抜)



クローズ耳せん
(ND-BRT ND-BR1 共通)
S MS M

希望小売価格 2個入 ¥630(税抜)

イヤモールド



シェル



カナル

- ・音漏れによる不快感をより軽減します。
- ・補聴器の脱落防止を可能にします。
- ・ハード(硬質)とソフト(軟質)があります。

希望小売価格 オープン

性能一覧表 JIS C 5512 : 2015 (2cm³カプラで測定) で表示

形状	品番	適応聴力範囲 (dB)	適応難聴度	使用電池	電池寿命(時間)	最大音響利得 (dB) HFA [±5dB]
オーダーメイド 耳あなタイプ	ND-CX3	25~85*2/ 25~80*1	軽度~高度	PR536	約90~110	44*2/37*1
	ND-CX4	25~90	軽度~高度	PR41	約150~190	48*3/42*2
	ND-CXD	25~90	軽度~高度	PR41	約150~190	48*3/43*2
	ND-C7NR	25~80	軽度~高度	PR536	約105~155	41*2/36*1
	ND-C8NR	25~90	軽度~高度	PR41	約160~235	47*3/43*2
	ND-C8P	50~110	中等度~重度	PR48	約310~370	58*5/54*4
	ND-CF	25~70	軽度~高度	PR41	約170	35
既製 耳あなタイプ	NEF-07	25~60	軽度~中等度	PR41	約180	31
	ND-F2	25~70	軽度~中等度	PR41	約180	35
	NEF-02	25~50	軽度~中等度	PR41	約330	24
小型耳かけタイプ (RIC)	ND-BR1	25~70*8/ 25~85*9	軽度~中等度	PR41	約235*8/約 190*9	38*8/41*9
	ND-BRT	25~65	軽度~中等度	PR41	約165	30
耳かけタイプ	ND-B4	25~90	軽度~高度	PR48	約310*6/ 約325*7	56*6/42*7
	ND-B1LT	25~70	軽度~高度	PR48	約370*6*7	46*6/31*7
	ND-B7T	25~90	軽度~高度	PR48	約290*6/ 約310*7	54*6/39*7
ポケットタイプ	NEF-P1	25~50	軽度	単4アルカリ電池	約200	25
	NDP-11H	25~70	軽度~中等度	単4アルカリ電池	約200	39
集音器	NHE-01	—	—	PR41	約50	24

最大音響利得 (dB) ピーク値 [+3dB以下]	90dB入力最大出力 音圧レベル (dB) HFA [±4dB]	90dB入力最大出力 音圧レベル (dB) ピーク値 [+3dB以下]	誘導コイル入力の 最大感度レベル (dB) [±6dB]	医療機器認証番号	掲載ページ
50*2/44*1	112*2/106*1	115*2/110*1	—	224AABZX00002A03	9
54*3/49*2	115*3/111*2	120*3/117*2	—	224AABZX00030A03	9
55*3/50*2	115*3/112*2	120*3/118*2	—	224AABZX00003A03	9
46*2/41*1	107*2/103*1	112*2/107*1	—	223AABZX00067A03	11
51*3/52*2	117*3/110*2	119*3/117*2	—	224AABZX00189A02	11
65*5/61*4	126*5/124*4	132*5/130*4	—	225AABZX00096A01	12
38	109	113	—	226AABZX00109000	13
36	103	107	—	229AABZX00081000	14
41	109	113	—	225AABZX00016A01	15
28	105	106	—	22000BZX00232000	15
42*8/45*9	104*8/113*9	110*8/116*9	—	225AABZX00098A02	16
35	101	106	—	226AABZX00135A01	16
63*6/60*7	127*6/111*7	131*6/128*7	89	223AABZX00133A01	17
51*6/42*7	119*6/105*7	124*6/117*7	—	223AABZX00137000	17
59*6/50*7	124*6/111*7	129*6/123*7	87*6/72*7	223AABZX00094A01	17
31	110	116	誘導コイルなし	224AGBZX00078A01	18
41	125	127	誘導コイルなし	224AGBZX00079A01	18
38	106	120	誘導コイルなし	なし	19

*1 イヤホン特小 *2 イヤホン小 *3 イヤホン中 *4 イヤホン大
*5 イヤホン特大 *6 フック *7 Sチューブ(オプション)
*8 EXスモールイヤホン *9 ミディアムイヤホン

※電池寿命は使用条件により異なります。
※本仕様は改良のため、お断りなく変更する場合があります。

ニコン補聴器のご用命は当店へ

何でもお気軽に補聴器相談員にご相談ください。

このカタログの内容は2018年4月（制定第一版）のものです。

株式会社 ニコン・エシロール

〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-8(住友不動産両国ビル3F)

TEL.03-5600-3528 FAX.03-5600-3579

フリーダイヤル ☎0120-312-507 <http://www.nikon-essilor.co.jp/>